



TELESKOP-, FRÄS- UND
GESCHIEBETECHNIK
KERAMIK, MODELLGUSS
PROTHETIK

ZAHNTECHNIK GMBH
KARL-HENSCHEL-STR. 18
72770 REUTLINGEN
TELEFON 0 71 21 / 50 90 83
TELEFAX 0 71 21 / 50 99 63

Pflegehinweise für herausnehmbaren Zahnersatz

Die tägliche Pflege Ihres Zahnersatzes bringt Ihnen Vorteile, die für Sie im Alltag wichtig sind: Gutes Aussehen, angenehmer Tragekomfort, Sicherheit und Wohlbefinden.

Pflege einer Teilprothese

1. Nach den Hauptmahlzeiten die Prothese mit Zahnbürste und Zahnpasta gründlich reinigen. Am besten hantiert man über einem Waschbecken, das mit Wasser gefüllt oder mit einem Waschlappen bzw. einem Handtuch ausgelegt ist. Denn wenn die Prothese aus der Hand rutscht, könnte sie im leeren Becken leicht zerbrechen.
2. Besonders die Zahnzwischenräume, die Flächen die dem Gaumen anliegen und besonders jene Teile, die Kontakt mit dem Restzahngewebis im Mund haben, sorgfältig bürsten.
3. Auch das Restgewebis im Mund auf die bekannte Art mit Zahnbürste und Zahnpasta reinigen.

Hin und wieder sollten auch die zahnlosen Stellen des Kiefers massiert werden. Leichtes Bürsten fördert die Durchblutung und damit die Erhaltung des Kiefers - eine wichtige Voraussetzung für den langfristig sicheren und stabilen Halt der Prothese.

Wichtiger Hinweis:

1. Aus Gründen der Haftung zwischen Kunststoff und Metall darf dieser Zahnersatz nicht in eine Reinigungslösung eingelegt werden.
2. Die Prothese nicht mit reinem Alkohol reinigen oder in diesen legen.
3. Kein Wasch- oder Geschirrspülmittel zur Reinigung verwenden.
4. Die Prothese nie mit heissem Wasser reinigen oder auskochen.

